

Set de botón gástrico con balón

Cód. 360



Producto diseñado para introducirse en la cavidad gástrica a través de un ostoma estable realizado previamente. Utilizado para la administración directa de alimentos en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y/o pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

- Permite la administración de alimentos naturales directo a la cavidad gástrica.
- Colocación y extracción práctica y cómoda para el paciente.
- El bajo perfil del dispositivo resulta cómodo para las actividades habituales de los pacientes.

Botón
100%
Silicona



Sistema de anclaje:

(A) Alinear la pestaña del conector con la marcación del botón.


(B) Introducir el conector.

(C) Girar 90°.

- Proceder de igual manera en la conexión del conector recto.
- Descompresión gástrica: la descompresión se realiza por medio del tubo de alimentación.

Set de botón gástrico con balón

Cód. 360

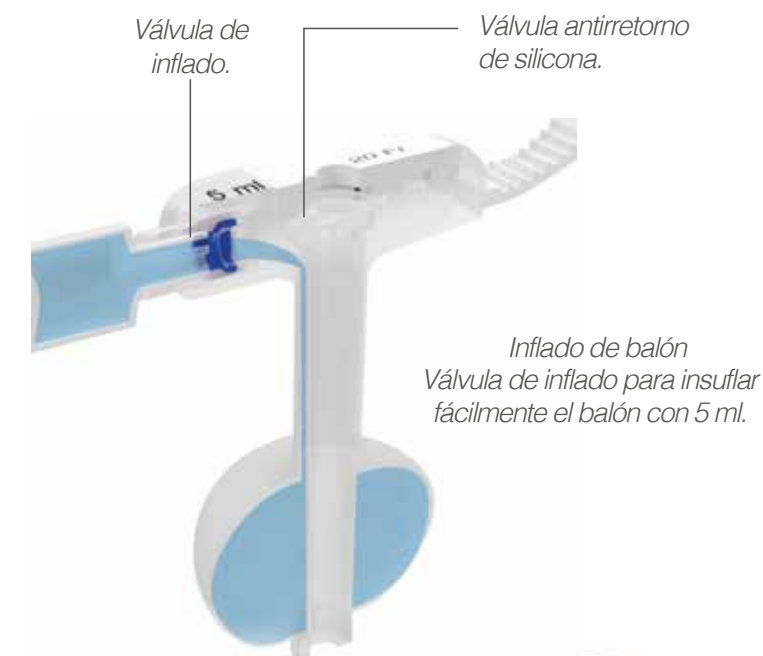

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)
360-18-15	18,0	6,00	1,50
360-18-17	18,0	6,00	1,70
360-18-25	18,0	6,00	2,50
360-20-15	20,0	6,70	1,50
360-20-17	20,0	6,70	1,70
360-20-25	20,0	6,70	2,50
360-24-15	24,0	8,00	1,50
360-24-17	24,0	8,00	1,70
360-24-25	24,0	8,00	2,50



Kit:
 (A) 2 tubos de alimentación.
 (B) 1 jeringa tipo Toomey.
 (C) 1 jeringa tipo luer slip.



Tubos de conexión únicos para el diseño del botón Silmag.

Kit de reposición: asegura la durabilidad prolongada del producto.		
Código	Denominación	Elementos del kit
TP-350	Prolongador para botón gástrico	Un tubo de alimentación con conector 90° de 50 cm de longitud
		Un tubo de alimentación con conector recto de 30 cm de longitud

Se comercializa un kit de accesorios de reposición con dos prolongadores para alimentación.